

Descripción del producto

PUMP es un extractor manual de leche materna de una única pieza fabricada al cien por ciento en silicona vulcanizada y de grado alimenticio.

Al usarlo, debe colocarlo en la mama contraria a la que el bebé está tomando y dejar que el PUMP simplemente succione y cumpla su función.

Sus principales características son:

- Se adapta a todos los tamaños de mama.
- Es silencioso, no se enchufa, ni se carga.
- Es fácil de usar y limpiar.
- Fabricado con material libre de BPA, PVC y Ftalatos.



pump.com.uy

pump

Extractor manual de leche materna

Basado en el reflejo de eyección

Libre de BPA, PVC y Plomo



Instrucciones:

1. Lave y esterilice el extractor.
2. Dé vuelta la copa del PUMP hacia atrás, sobre la base.
3. Presione la copa y la base al mismo tiempo.
4. Manteniendo apretado coloque el orificio de la copa centrado sobre el pezón.
5. Suelte suavemente, cuidando que quede hundido a los costados de la base y de vuelta la copa sobre la mama.
6. Deje que el PUMP simplemente succione, una vez que se produzca el reflejo de eyección comenzará a recolectar la leche.


2



3



5

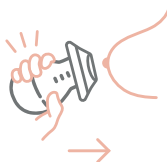

Lavado y esterilización.

Lave con agua y jabón después de cada uso.

Una vez al día procure esterilizarlo con su sistema de esterilización propio.

- Coloque agua hasta la mitad del Pump.
- Tápelolo y sáquele la tapa blanca.
- Introdúzcalo dentro del microondas durante 3 minutos.
- ¡Está listo para volver a ser usado!

Precauciones

- No lave el producto con ningún tipo de abrasivo, ya que puede estropear la silicona.
- No lo guarde cerca de objetos filosos.
- Almacénelo en un lugar fresco, seco y que no le dé la luz solar en forma directa.