




Set saca leche hands free x2 DLX
Ref. BB001016S20

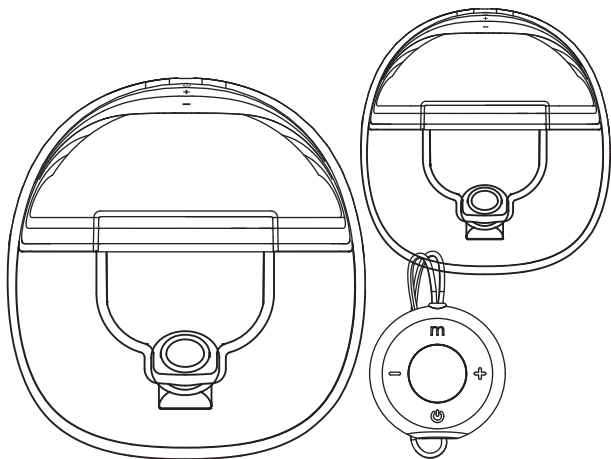

- Lea cuidadosamente este instructivo antes de armar y usar el producto.
- El ensamble debe ser realizado únicamente por un adulto.
- Conserve este instructivo para futuras referencias.
- Accesorios, modelos y especificaciones pueden variar según referencia

¡Gracias por elegir nuestro producto!

Este ha sido diseñado y elaborado siguiendo los estándares de seguridad y calidad internacionales.

Con el fin de utilizar de forma correcta este producto, lea el instructivo cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias. Le ayudará a entender integralmente el producto, y asegurará que usted siempre pueda hacer un uso adecuado del mismo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



El Saca Leches Bebesit, está diseñado pensando en la comodidad y la eficacia de las nuevas mamás. Este innovador saca leches cuenta con un modo de extracción que simula la frecuencia de succión real del bebé, ofreciendo una experiencia natural y cómoda.

Con diferentes niveles de potencia de succión, nuestro sacaleches permite a las mamás encontrar fácilmente la intensidad adecuada para obtener más leche en menos tiempo. Esto brinda a las nuevas mamás más opciones y comodidad, adaptándose a sus necesidades individuales.

Nuestra prioridad es la seguridad de tu bebé. Por eso, nuestro sacaleches eléctrico está fabricado con materiales más seguros, libres de BPA, apto para uso alimentario, no tendrás que preocuparte por sustancias nocivas en tu preciosa leche materna.

Además de ser seguro, nuestro sacaleches cuenta con un diseño ergonómico que se adapta perfectamente al pecho, proporcionando un ajuste cómodo y seguro durante su uso.

Nuestra tecnología de bombeo innovadora asegura que el sonido durante su uso sea mínimo, lo que no perturbará a un bebé dormido. Así, podrás extraer leche de forma discreta y sin interrupciones.

Confía en nuestro Saca Leche para brindarte la comodidad, seguridad y eficacia que necesitas durante este hermoso viaje de la maternidad.

BENEFICIOS DE LA SUCCION ASISTIDA POR SACALECHES


El uso del extractor de leche portátil tiene múltiples efectos benéficos:

En primer lugar, el extractor de leche simula el patrón de succión de un bebé, y ayudar en la succión del pecho, estimulando así la producción de leche, lo que ayuda a satisfacer de mejor manera las necesidades de los bebés.


También, el extractor de leche promueve la contracción del pecho y por tanto la eyección de leche de los conductos mamarios, garantizando el vaciado del pecho y aliviando la hinchazón de la leche de la madre. Además, la succión repetida con el extractor de leche promueve la extracción de leche excesiva de los conductos mamarios, lo que puede prevenir la aparición de mastitis aguda.

Por último, el uso del extractor de leche mejora la tasa de lactancia materna exclusiva y aumenta la confianza de las madres en la lactancia materna, lo que es beneficioso tanto para las madres como para los bebés.

Nota: Este producto es adecuado para uso personal en la familia y no se recomienda su uso como herramienta auxiliar por instituciones o tratamientos médicos específicos.

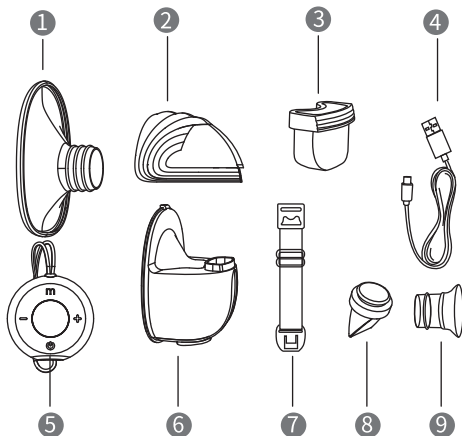


- 1- BRIDA
- 2- MOTOR DE LA BOMBA
- 3- DIAFRAGMA DE SILICONA
- 4- CABLE DE CARGA USB
- 5- CONTROL REMOTO
- 6- RECOLECTOR DE LECHE
- 7- HEBILLA DE AJUSTE DEL SUJETADOR
- 8- VÁLVULA
- 9- CORCHO

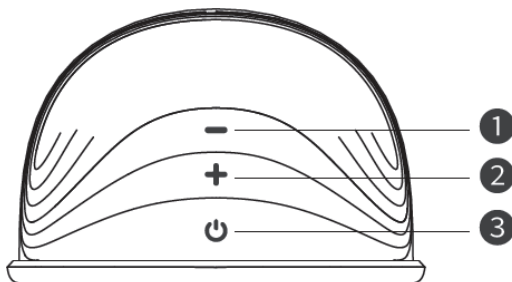

- 1- BOTÓN DE DISMINUCIÓN DE NIVEL
- 2- BOTÓN DE AUMENTO DE NIVEL
- 3- BOTÓN DE ENCENDIDO / PANTALLA DE
ENCENDIDO / BOTÓN DE SELECCIÓN DE MODO

NOTA

este producto cuenta con una batería de iones de litio incorporada. Cuando el indicador de batería muestra una barra parpadeante, recomendamos que utilice un adaptador certificado de 5V=1A para cargar el motor de la bomba tan pronto como sea posible.

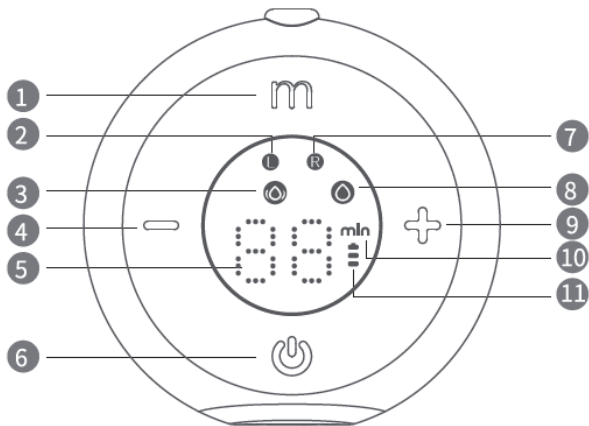

- 1- BOTÓN DE SELECCIÓN DE MODO
- 2- CONTROL DE BOMBA DEL PECHO IZQUIERDO
/ PANTALLA DE ENERGÍA DEL MOTOR DE LA BOMBA
- 3- MODO MASAJE
- 4- BOTÓN DE DISMINUCIÓN DE NIVEL
- 5- PANTALLA DE NIVELES / PANTALLA DE TIEMPO
- 6- BOTÓN DE ENCENDIDO / BOTÓN DE CAMBIO
IZQUIERDA/DERECHA
- 7- CONTROL DE LA BOMBA DEL PECHO
DERECHO / PANTALLA DE ENERGÍA DEL MOTOR
DE LA BOMBA
- 8- MODO DE EXPRESIÓN
- 9- MODO DE AUMENTO DE NIVELES
- 10- UNIDADE DE TIEMPO (MINUTO)
- 11- INDICADOR DE BATERÍA

Para ensamblar la bomba, siga los siguientes pasos.

PRECAUCIONES

- Asegúrese de limpiarla bomba según las instrucciones de este manual del usuario.
- Asegúrese de ensamblarla bomba correctamente según las instrucciones de este manual del usuario.
- Para evitar fugas, retire los residuos alrededor del borde antes de ensamblar.
- Lávese las manos a fondo antes de ensamblar los componentes limpiados.

1. Instale la válvula en el recolector de leche, preste atención a la dirección de instalación.



2. Coloque el diafragma de silicona en el recolector de leche y presiónelo con las manos para que los bordes se sujeten firmemente y aseguren.




3. Para instalarla brida en el recolector de leche, asegúrese de alinear la ranura de desviación en la brida con la ranura de reflujo en el recolector de leche.



El contacto magnético en la brida se alinea con la ranura del contacto magnético en el recolector de leche, y luego presione los bordes con ambas manos para asegurar que el sellado esté en su lugar.


4. Instale el motor de la bomba del pecho en el recolector de leche, alinee la muesca debajo del cuerpo principal con el diafragma de silicona y ensámblelo hacia abajo para que se ajuste al recolector de leche y asegure un sellado completo.

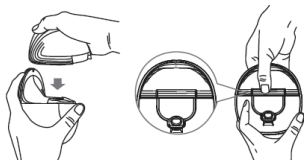


PARA COMENZAR A BOMBEAR




1. Presione firmemente la brida contra el pecho, no deje espacios y asegúrese de que sus pezones estén centrados. Manténgalo erguido. Tenga cuidado de no distorsionar la posición del producto y el pecho, de lo contrario, la bomba de pecho no tendrá succión.

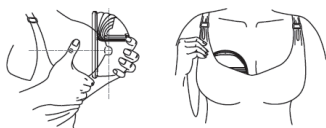


2. Mantenga presionado el botón de encendido para iniciar la bomba de pecho.

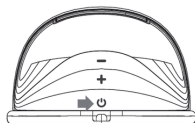


3. Presione brevemente la tecla "on/off" para cambiar al modo de expresión. Al presionar este botón, hay dos modos (modo de expresión, modo de masaje) para que elija.

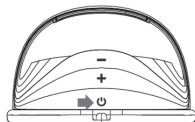


4. Hay 9 niveles en cada modo. Puede elegir la succión que le resulte cómoda presionando brevemente el botón "+" de aumento de nivel y el botón de disminución de nivel. Cada vez que presiona el botón, la luz indicadora de energía parpadea una vez; Cuando el nivel es 9 o 1, al presionar el botón, la luz indicadora de energía parpadea tres veces.

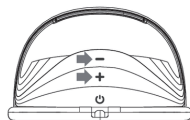

5. Mantenga presionado el botón de encendido "on/off" para apagar la bomba de pecho.

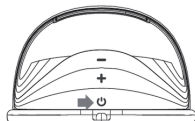

6. La bomba de pecho no funciona cuando se carga con un cargador. Cuando la luz indicadora de energía sigue parpadeando mientras la bomba de pecho está funcionando, significa que la energía es baja, por favor cárguela a tiempo.

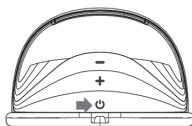


Consejos:

1. Este modelo tiene una función de memoria incorporada; al encenderla nuevamente, automáticamente ingresará y subirá al modo de trabajo y nivel de succión que utilizó la última vez.
2. La bomba de pecho se detendrá automáticamente después de 20 minutos de trabajo.

EMPAJERAMIENTO DEL CONTROL REMOTO




1. Empareje el control remoto con la bomba de pecho primero, para que el motor de la bomba pueda ser controlado por el control remoto más tarde
2. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado "on/off" para encender la bomba de pecho
3. Presione los botones "+" y "-" al mismo tiempo hasta que el LEO parpadee, ingrese al estado de emparejamiento del control remoto y luego suelte el botón.

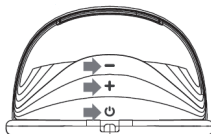

4. Mantenga el control remoto dentro de 1 metro de la bomba de pecho emparejada.

Presione brevemente el botón de encendido/apagado del control remoto "on/off", la pantalla del control remoto se iluminará

5. Presione los botones "+" y "-" del control remoto al mismo tiempo para emparejarlo con la bomba de pecho mencionada anteriormente. Después de terminar el emparejamiento, el LEO de la bomba de pecho dejará de parpadear y permanecerá encendido

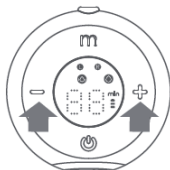


ADAPTACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA




1. Cuando haya completado el emparejamiento anterior, puede controlar la bomba de pecho con el control remoto. La "L" en el control remoto corresponde a su bomba de pecho izquierda; la "R" corresponde a su bomba de pecho derecha. Cuando se emparejan bombas de pecho unilaterales, el control remoto se emparejará automáticamente con las bombas de pecho.


2. Si el control remoto no se utiliza durante 1 minuto, la pantalla se apagará y entrará en estado de suspensión. Presione brevemente el botón de encendido/apagado para reiniciar el control remoto y presione brevemente el botón de encendido/apagado por segunda vez; la pantalla mostrará "R" y "L" alternativamente. Cuando la pantalla muestra "R", el control remoto controlará la bomba de pecho derecha; mantenga presionado el botón de encendido/ apagado para encender/apagar la bomba de pecho derecha. Cuando la pantalla muestra "L", el control remoto controlará la bomba de pecho izquierda; mantenga presionado el botón de encendido/ apagado para encender/apagar la bomba de pecho izquierda.

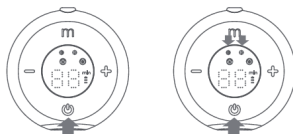


3. La "m" en el control remoto es el botón de cambio de modo. Presione brevemente este botón, hay dos modos (modo de masaje y modo de expresión) para que elija; Cuando "6" está encendido, significa el modo de masaje; Cuando "@" está encendido, significa el modo de expresión.

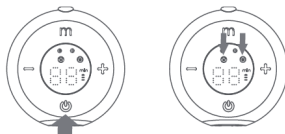


4. Cada modo corresponderá a 9 niveles, presione brevemente los botones "+" o "-" para seleccionar el nivel que le resulte cómodo.

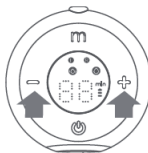

5. Mantenga presionado el botón de encendido del control remoto "on/off" para apagar la bomba de pecho.

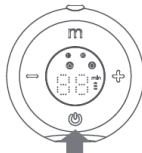

5. Cuando la bomba de pecho está encendida, cuando se activa el control remoto o se opera un engranaje, la pantalla del control remoto mostrará el engranaje en el modo de funcionamiento actual. Si no se presiona ninguna tecla en el control remoto dentro de 2 segundos, la pantalla saltará a la pantalla de tiempo y la unidad de tiempo "min" se iluminará en la pantalla.

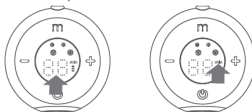


1. La luz verde está encendida cuando el control remoto está completamente cargado.

Cuando la energía es insuficiente, la luz roja parpadeará; cuando la luz roja esté encendida, por favor, cárguela a tiempo. Cuando " L " o " R " parpadea, significa que la energía del anfitrión es insuficiente, por favor, cargue el anfitrión a tiempo.



2. El indicador de batería parpadeará y mostrará una luz roja durante la carga, parpadeará en verde cuando esté casi completo y permanecerá encendido cuando esté completamente cargado..

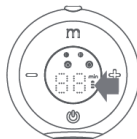

Consejos:

1. El dispositivo no funciona mientras se carga.
2. El tiempo de operación continua puede cambiar según la batería o las condiciones de funcionamiento.
3. El tiempo de carga puede cambiar según la energía de la batería restante, la temperatura también o las condiciones de la carga.
4. Este producto tiene una batería de iones de litio incorporada. Cuando la luz roja del indicador de batería está encendida, recomendamos que utilice un adaptador de corriente certificado 5V 0,5A para el control remoto tan pronto como sea posible.

INSTRUCCIÓN PARA LA HEBILLA DE AJUSTE DEL SOSTEN



Relájese y siéntese en una silla cómoda, inclínese ligeramente hacia adelante (use un cojín para apoyar la espalda). Asegúrese de que su cuerpo esté en la misma línea que la bomba de pecho.



INSTRUCCIÓN PARA LA HEBILLA DE AJUSTE DEL SOSTEN



Ajuste la longitud de las correas del sostén, haga que la succión sea más cómoda. Un extremo de la hebilla de ajuste del sostén se cuelga en el broche interior del sostén de lactancia. La longitud de la hebilla del sostén en el otro extremo de la hebilla de ajuste del sostén.




FINALIZANDO SU JORNADA DE EXTRACCIÓN DE LECHE




Después de terminar de extraer leche, retire la bomba de la mama. Mantenga la bomba en posición vertical y retire la parte del motor, luego sostenga el recolector de leche para verter la leche materna en el biberón. Asegúrese de que la abertura del recolector de leche de la copa de la mama esté alineada con la boca del biberón para evitar derrames de leche materna.

Después de terminar de extraer leche, retire la bomba de la mama. Mantenga la bomba en posición vertical y retire la parte del motor, luego sostenga el recolector de leche para verter la leche materna en el biberón. Asegúrese de que la abertura del recolector de leche de la copa de la mama esté alineada con la boca del biberón para evitar derrames de leche materna.

1. Después de la extracción de leche, mantenga pulsado el botón de encendido para desconectar la alimentación, rompa el sello entre el pecho y el embudo del extractor de leche con los dedos y, a continuación, retire con cuidado el extractor del pecho.

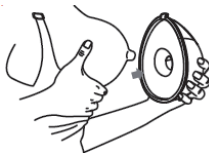

2. Separe el recolector de leche del motor de la bomba listo para alimentación / almacenamiento. Limpie las otras partes usadas según las instrucciones.

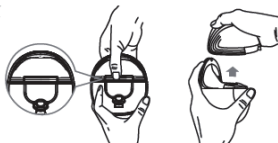

3. Vierta la leche en el biberón; asegúrese de que la característica de la ranura esté alineada con el biberón.





	Primera vez de uso	Después de cada uso
Cuerpo de la bomba	/	Limpiar con un paño limpio y húmedo con alcohol etílico al 70% o alcohol isopropílico según sea necesario. No sumerja la bomba en agua.
Flange, Diafragma de Silicona, Conector, Válvula, Recolector de Leche, Tapa de Sellado, Tubo	Hervir en agua durante 5 minutos. No caliente en microondas el Flange, Diafragma de Silicona, Conector, Válvula y Recolector de Leche, Tapa de Sellado, Tubo.	Limpiar con jabón suave o agua limpia.

ADVERTENCIAS

- Tenga cuidado al quitar y limpiar la válvula, si la válvula está dañada, la bomba de pecho no funcionará correctamente.
- Para limpiar la válvula, frótela suavemente en agua tibia con unas gotas de líquido limpiador. No inserte objetos en la válvula, lo que puede causar daños.

Limpiar a mano

- Coloque las piezas de la bomba en un lavabo limpio usado solo para artículos de alimentación infantil. No coloque las piezas de la bomba directamente en el fregadero.
- Agregue jabón y agua caliente al lavabo.
- Frote los artículos usando un cepillo limpio solo para artículos de alimentación infantil.
- Enjuague sosteniendo los artículos bajo agua corriente o sumergiéndolos en agua fresca en un lavabo separado.
- Secar al aire completamente. Coloque las piezas de la bomba, el lavabo y el cepillo de botellas en un paño de cocina limpio y sin usar o en una toalla de papel en un área protegida del polvo y la suciedad. No use una toalla de cocina para frotar o secar los artículos.
- Limpie el lavabo y el cepillo de botellas. Enjuáguelos bien y déjelos secar al aire después.



Almacenamiento de la leche materna

1. Solo almacene leche materna recolectada por bombas de pecho esterilizadas.
2. La leche extraída se puede colocar en una bolsa de almacenamiento de leche limpia y esterilizada o en una botella de leche con un cojín de sellado, y colocarse inmediatamente en el refrigerador para refrigerar o congelar.

Cuidado

1. No congele repetidamente la leche materna.
2. No mezcle leche materna fresca con leche materna congelada.
3. Asegúrese de desechar la leche materna restante después de la alimentación.
4. La leche extraída se puede refrigerar en el refrigerador durante 48 horas (dentro del refrigerador) o congelarse en el congelador durante tres meses, y la botella de leche o la bolsa de almacenamiento de leche pueden etiquetarse claramente con la fecha y hora del ordeño.

Descongelación de la leche materna

Coloque la leche materna congelada en el compartimiento del refrigerador durante una noche para descongelar. En caso de emergencia, puede usar un recipiente con agua caliente para descongelar la leche materna. Después de descongelar la leche materna, debe consumirse dentro de las 24 horas.

Calentamiento de la leche materna

1. Coloque el biberón en posición vertical en un recipiente con agua caliente o caliente la leche materna de manera segura y rápida con un calentador de biberones y alimentos para bebés.
2. ¡Tenga en cuenta! Antes de alimentar a su bebé, asegúrese de verificar la temperatura de la leche materna.
3. No use un horno de microondas para calentar la leche materna, ya que esto puede destruir nutrientes y anticuerpos importantes.
4. Además, el calentamiento desigual puede causar un sobrecalentamiento parcial del líquido, lo que puede provocar quemaduras.
5. No sumerja la botella de almacenamiento de leche en agua hirviendo para calentarla para evitar que se rompa o agriete.



1. No coloque el control remoto en un área húmeda o agua, de lo contrario, el control remoto es propenso a la humedad y el cortocircuito. No coloque el control remoto en la luz solar directa o en el área de fuego para evitar quemar el control remoto.
2. Si hay polvo y aceite en la superficie de la caja del control remoto, límpielela con un paño suave mojado en agua jabonosa. La caja del control remoto debe mantenerse limpia para no afectar el uso normal.
3. El producto debe ser utilizado bajo supervisión de adultos, y las partes del producto no deben ser utilizadas como juguetes.
4. Después de cargar completamente, desenchufe, la carga a largo plazo puede provocar incendios y otros accidentes de seguridad.
5. Se recomienda que el productos e empareje con un adaptador que cumpla con los requisitos de seguridad locales (entrada: 100-240V-50/ 60Hz-0.45 salida: 5.0V-0.5A).

Especificaciones Eléctricas

Voltaje de alimentación: 5V CC 1A

Tiempo de Carga: 2.5 horas

Tiempo de funcionamiento: 1.5 horas

Tipo de batería: Batería de Litio

Distancia de uso para control remoto: 5 metros

Set Saca Leches

BB001016S20

Producto Comercializado en Mexico por:

Asesorías Montes Urales S de RL de CV

RFC: CMI210615Q30

Presidente Masaryk 8 Piso 5, Bosque de Chapultepec 1

Sección, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México, México.

Website: www.merama.io

Email: hola.bebesit@merama.mx

Teléfono: +52 5573331713

Fecha de compra: _____

Fecha recepción de Producto: _____

Clausulas:

Asesorías Montes Urales S de RL de CV garantiza los productos de la marca bebesit, en todas sus partes, contra defectos de fabricación y piezas por el término de 3 meses (90 días) a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor.

Condiciones:

- El producto ha sido fabricado y se ha comprobado su buen funcionamiento en la fábrica, bajo condiciones normales de uso. Además, cumple con todas las normas vigentes en el país.
- Para reclamar la garantía, el usuario debe presentar el producto, la póliza de garantía sellada y el comprobante de compra o documento que acredite su entrega.
- En caso de presentar desperfecto en fabricación de materiales deberá comunicarse al servicio de Asesorías Montes Urales S de RL de CV, al Email: hola.bebesit@merama.mx o Teléfono: +52 5573331713. Se estará solicitando evidencia gráfica para validar la garantía del producto y sus piezas, el equipo de Asesorías Montes Urales S de RL de CV determinará si se reparará o reemplazará por un equipo nuevo sin cargo alguno al consumidor, Asesorías Montes Urales S de RL de CV también hará el envío al domicilio del consumidor sin cargo alguno. En caso de que el desperfecto no sea por razones de fabricación se le hará saber al consumidor y se le notificará el costo de la reparación necesaria de su producto, así como también del costo por los gastos de envío.
- Para hacer efectiva la garantía favor de comunicarse al correo electrónico hola.bebesit@merama.mx. O acudir a nuestras instalaciones ubicadas en Calzada General Mariano Escobedo 555, Rincon del Bosque, Bosques de Chapultepec 1 sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, C.P. 11580, donde el consumidor podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto o piezas tengan alteraciones o averías, debido a manipulaciones de herramental inadecuado.
- Cuando la operación y manejo del producto sea en condiciones no prescritas en el manual de instalación y manejo.
- Las fallas por falta de mantenimiento o por instalación de piezas no originales.

NOTAS:

- Asesorías Montes Urales S de RL de CV no asume responsabilidad alguna por daños personales a la propiedad incluyendo lo causado en el producto y lo que pudiera causar debido a la incorrecta instalación por personas no autorizadas.
- La garantía no podrá exigir otros requisitos que la presentación del producto, la póliza vigente y comprobante de venta.