


 bebesit

Colector de leche
Ref. Y104BBST

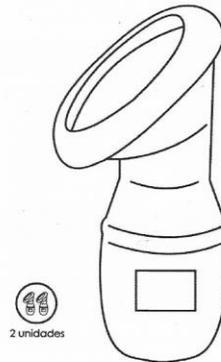

- Lea cuidadosamente este instructivo antes de armar y usar el producto.
- El ensamble debe ser realizado únicamente por un adulto.
- Conserve este instructivo para futuras referencias.
- Accesorios, modelos y especificaciones pueden variar según referencia

 bebesit

Garantía Válida en Uruguay



meses
★★★★★

Yomani S.A garantiza el normal funcionamiento de los productos Bebesit contra cualquier defecto de fabricación, materiales o mano de obra.

Uruguay
Yomani S.A.
Bvr Batlle y Ordoñez 5260 esg Gambetta
Montevideo, Uruguay
Tel. (598) 2 359 47 47
info@bebesit.com.uy
ww.bebesit.com.uy

PRECAUCIONES

Los colectores de leche materna de silicona no son completamente herméticos. Si necesita preservar la leche materna, por favor agregue la leche a una botella de almacenamiento de leche o a una bolsa de almacenamiento de leche, séllelos y refrigérelos. Es recomendado que se use un cepillo de limpieza especial de biberones para limpiar el colector de leche. No use ningún utensilio filoso o cortante al limpiar el producto para evitar rasguños o daños en la pared interna de silicona.

Revise el producto antes de cada uso, si algún defecto o daño es encontrado, reemplace el producto en ese momento.

¡Gracias por elegir nuestro producto!
Este ha sido diseñado y elaborado siguiendo los estándares de seguridad y calidad internacionales.
Con el fin de utilizar de forma correcta este producto, lea el instructivo cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias. Le ayudará a entender integralmente el producto, y asegurará que usted siempre pueda hacer un uso adecuado del mismo.

INSTRUCCIONES

Por favor limpie sus senos y pezones antes de recolectar la leche materna. De igual manera limpie y desinfecte el colector de leche antes de su uso.

Cuando recolecte la leche materna, coloque la boquilla del colector de leche materna muy ajustado al seno y presione gentilmente el colector hasta que se genere succión y la leche materna que sale del seno fluya hasta la botella. Repita la acción anterior hasta que se recolecte la mayor cantidad de leche materna hasta la máxima capacidad de la botella recolectora.

Una vez la capacidad este completa, se puede agregar la leche directamente al biberón del bebé para alimentarlo o se puede colocar el bolsos de almacenamiento de leche materna y almacenarlas en el congelador o refrigerador para alimentar al bebe en una futura ocasión que lo necesite.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de usar el producto por primera vez, es recomendado limpiarlo y desinfectarlo con el esterilizador Bebesit para que este propósito de limpieza sea cumplido. Después de cada uso, el colector de leche debe ser limpiado y desinfectado lo más rápido posible, y posteriormente almacenado en un contenedor sellado.

El colector de leche puede ser desinfectado de las siguientes dos formas:

1. Esterilización por vapor
2. Desinfección por hervor: hierva el producto en agua hirviendo por un lapso de 3 a 5 minutos, asegúrese que el producto no toque las paredes del contenedor en el cual está hirviendo el agua ya que puede causar que se deforme y dañe el producto.

Después que limpie y desinfecte el colector de leche, no debe exponerlo a la luz y debe ser guardado en un contenedor sellado para un uso próximo.



Garantía Válida en Chile

Garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra. Durante el tiempo de garantía los productos serán reparados sin ningún costo siempre y cuando los defectos presentados sean: Falla de fábrica. No aplica garantía en casos fortuitos, mal uso o la intervención de personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.

Importado por:
Chile
Comercial E Industrial Stroller SPA
Av. San Ignacio 451, Comuna de Quiicura
Santiago, Chile.
Tel. (56 2)685-8300
servicio.clientes@bebesit.cl
www.bebesit.cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

Garantía Válida en México

Producto Comercializado en México por:
Asesorías Montes Urales S de RL de CV
RFC: CMIZ10615230
Presidente Masayú 8 Piso 5, Bosque de Chapultepec 1
Sección, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México, México.
Web: www.merama.io
Email: hola.bebesit@merama.mx
Teléfono: +52 5573331713

Fecha de compra: _____
Fecha recepción de Producto: _____

Clausulas:

Asesorías Montes Urales S de RL de CV garantiza los productos de la marca bebesit, en todas sus partes, contra defectos de fabricación y piezas por el término de 3 meses (90 días) a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor.

Condiciones:

El producto ha sido fabricado y se ha comprobado su buen funcionamiento en la fábrica, bajo condiciones normales de uso, Además, cumple con todas las normas vigentes en el país.

Para reclamar la garantía, el usuario debe presentar el producto, la póliza de garantía sellada y el comprobante de compra o documento que acredite su entrega.

En caso de presentar desperfecto en fabricación de materiales deberá comunicarse al servicio de Asesorías Montes Urales S de RL de CV, al Email: hola.bebesit@merama.mx o Teléfono: +52 5573331713. Se estará solicitando evidencia gráfica para validar la garantía del producto y sus piezas, el equipo de Asesorías Montes Urales S de RL de CV determinará si se reparará o reemplazará por un equipo nuevo sin cargo alguno al consumidor, Asesorías Montes Urales S de RL de CV también hará el envío al domicilio del consumidor sin cargo alguno. En caso de que el desperfecto no sea por razones de fabricación se le hará saber al consumidor y así le notificará el costo de la reparación necesaria de su producto, así como también del costo por los gastos de envío.

Para hacer efectiva la garantía favor de comunicarse al correo electrónico hola.bebesit@merama.mx. O acudir a nuestras instalaciones ubicadas en Calzada General Mariano Escobedo 555, Rincon del Bosque Bosques de Chapultepec 1 sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.p. 11580, donde el consumidor podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Cuando el producto o piezas tengan alteraciones o averías, debido a manipulaciones de herramental inadecuado.
Cuando la operación y manejo del producto sea en condiciones no prescritas en el manual de instalación y manejo.
Las fallas por falta de mantenimiento o por instalación de piezas no originales.

NOTAS:

Asesorías Montes Urales S de RL de C no asume responsabilidad alguna por daños personales a la propiedad incluyendo lo causado en el producto y lo que pudiera causar debido a la incorrecta instalación por personas no autorizadas.

La garantía no podrá exigir otros requisitos que la presentación del producto, la póliza vigente y comprobante de venta.